

KOMPLETNA ZAŠTITA RANE

**Ercefilm®**

SURGERY



Transparentni flaster u spreju



# Ercefilm<sup>®</sup> isključuje upotrebu kompresa i pokrivki za rane

Mek i transparentan  
Bakteriostatik  
Vodootporan

## Ercefilm<sup>®</sup>

- Štiti ranu od kontaminacije
- Omogućava konstantanu opservaciju stanja rane
- Omogućava rano otkrivanje znakova lokalne infekcije
- Dozvoljeno kupanje i tuširanje nakon nanošenja spreja
- Pomaže zarastanju rane

## Metode korišćenja Ercefilm<sup>®</sup>

- Očistiti i dezinfikovati ranu pre nanošenja
- Promućkati pre upotrebe i naneti sa razdaljine od najmanje 10cm na površinu koja se tretira
- Sačekati da se osuši
- Ercefilm se može skinuti gazom natopljenom 90% alkoholom

### Kontraindikacije:

- Da bi se izbeglo osetljivost pacijenta na aktivne supstance ne upotrebljavati Ercefilm<sup>®</sup> na mukoznu membranu, duboke i neočišćene rane ili opekotine
- Osetljivost na jednu od aktivnih supstanci

### Composition:

- Polyethoxyethylmethacrylate
- Ethyle acetate
- Ethanol
- Approved propellant



Reference : 05100

